

Fragen? Wir helfen weiter:
(werktags 8 h - 17 h)



062 858 71 25



++49 151 - 56 42 56 56

Stellen Sie sicher, dass alles ausgefüllt und unterschrieben ist. Die Analyse wird sich verzögern, wenn Unterschriften oder Unterlagen fehlen. Für Minderjährige unterschreiben **alle** Sorgeberechtigten.

Der Probennehmer

Öffnen Sie den Umschlag "Probenentnahmeset". Bitte die Teststäbchen NICHT verwenden, wenn das Siegel bereits gebrochen ist.



- Mit Hilfe der Testteilnehmer beschriften Sie die Probenumschläge.
- Machen Sie eine klare, deutliche Kopie aller Ausweisdokumente bzw. Geburtsurkunden.
- Jeder Testteilnehmer erhält dann ein verschlossenes Päckchen mit Wattestäbchen.

Entnahme der Proben



- Ein Testteilnehmer entnimmt 1 Probenstäbchen.
- Der Watteteil wird nicht berührt.
- Mit einer leichten Drehbewegung wird das Wattestäbchen an der Wangeninnenseite gut hin und her gedreht, um genug Zellmaterial zu entnehmen.
- Der Vorgang wird mit dem 2. Stäbchen auf der anderen Mundseite wiederholt.

Verpacken der Teststäbchen



- Die benutzten Teststäbchen direkt nach der Probenahme ohne Trocknungszeit in den beschrifteten Probenumschlag stecken.
- Für die Probenahmen bei den anderen Testpersonen bitte genauso verfahren.
- **Vertauschungen vermeiden:** Probenahme eines Teilnehmers erst komplett abschließen, bevor mit der nächsten begonnen wird.

Sachkundige Zeugen (Probennehmer) bei der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätssicherung während einer Probenahme sind: Arzt, Apotheker, Hebammen, Mitarbeiter des Jugend- oder Gesundheitsamtes, Krankenhauspersonal, Notar. Sie begleiten die Probenahme, kontrollieren und übertragen die persönlichen Daten und versenden die Testunterlagen.

Komplettierung der Unterlagen



- Füllen Sie aus, welchen DNA Test Sie beauftragen (Seite 1).
- Alle Teilnehmer geben ihre schriftliche Einwilligung (Seite 3).
- Der Probennehmer bestätigt die korrekte Durchführung der Probenahme (Seite 3).
- Geben Sie uns Ihre Kontaktdaten und bestellen Sie Ihr persönliches Gutachten (Seite 2).

Rücksendung an unser Labor

Der Probennehmer legt die kompletten und unterschriebenen Unterlagen in den Rückumschlag:



- ✓ alle Formulare
- ✓ die Kopien der Ausweise bzw Geburtsurkunden
- ✓ die beschrifteten und verschlossenen Probenumschläge

Der Probennehmer sendet den Rückumschlag an uns. Anderes ist nicht zulässig (Gefahr der Manipulation an den Proben) und führt dazu, dass wir den Test nicht bearbeiten können.

Der Versand Ihres Gutachtens

Gutachten werden an alle auf Seite 2 aufgeführten Personen gesendet.



Für DNA Vaterschaftstests versenden wir unsere Gutachten spätestens 4 Werktage nach Erhalt der kompletten Unterlagen und der Zahlung. Andere DNA-Tests haben eine längere Bearbeitungszeit.